

TENA Anlegetechnik

TENA Lady



1. Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Einlagenrückseite entfernen, Einlage falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose legen



3. Hose fixieren

TENA Men



1. Legen Sie Penis und Hoden in die Einlage, Einlage falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Entfernen Sie den Papierklebestreifen, so dass die Klebefläche freigelegt wird



3. Ziehen Sie die Unterwäsche hoch


TENA Comfort mit ConfioAir™



1. Netz hose bis zur Mitte der Oberschenkel hochziehen. Falten Sie die TENA Comfort der Länge nach, so dass eine Schalenform entsteht




2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel ausserhalb der Vorlage befinden

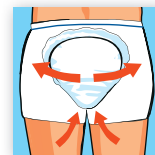


3. Fixierhose hochziehen und die Bein elastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“



1. Legen Sie die Vorlage von vorne nach hinten zwischen die Beine, falten Sie die Vorlage der Länge nach, so dass eine Schalenform entsteht

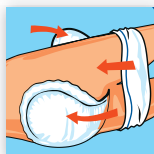

2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel ausserhalb der Vorlage befinden

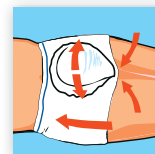

3. Fixierhose hochziehen und die Bein elastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“

TENA Pants / Lady Pants / Men Level 4



1. Ziehen Sie die TENA Lady Pants / Pants nach oben



2. Ziehen Sie die TENA Lady Pants / Pants wie normale Unterwäsche über die Beine



3. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreissen

TENA Flex



1.-2. Öffnen Sie zuerst den Hüftbund am Produkt. Legen Sie den Bund um die Hüfte und schließen Sie ihn mit dem Klettverschluss



3. Ziehen Sie die Vorderseite der Vorlage nach oben Richtung Hüfte und richten Sie sie an den Seiten aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest



4. Prüfen Sie, ob die Klettverschlüsse sicher befestigt sind und das Produkt im Leistenbereich richtig sitzt



1.-2. Falten Sie aus der komplett aufgefalteten Vorlage eine Schalenform. Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite und ziehen Sie den Hüftbund unterhalb der Hüfte durch. Drehen Sie den Betroffenen auf den Rücken und ziehen Sie die Vorlage zwischen den Beinen hindurch



3. Dehnen Sie die Vorderseite der Vorlage in Richtung Hüfte und zu beiden Seiten aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse mit sanftem Druck und glätten Sie mögliche Hautfalten in der Leiste



4. Kontrollieren Sie mehrfach, dass die Klettverschlüsse sicher befestigt sind und die Vorlage im Leistenbereich richtig sitzt

TENA Slip mit ConfioAir™




1. Legen Sie die längsgefaltete Schutzhose von vorne nach hinten zwischen die Beine und streichen Sie die Vorderseite glatt



2. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden



3. Ziehen Sie leicht an den Klettverschlüssen, um sie im Gewebe der Aussen-seite zu fixieren

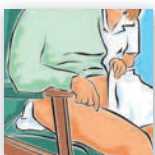

1. Setzen Sie den Betroffenen auf die Schutzhose



2. Ziehen Sie die Vorderseite zwischen den Beinen hoch



3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden



1. Legen Sie die längsgefaltete Schutzhose von vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch an



2. Ziehen Sie die Vorderseite der Schutzhose mit Zickzack-Bewegungen an



3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden