

## Vorbereitung



Stellen Sie den Socks-jet auf eine gerade, trockene Fläche. Der Standfuß zeigt mit dem Griff zu Ihnen. Die halbkreisförmige Rohröffnung zeigt nach vorne.



Ziehen Sie den Strumpf über den Rohrkörper. Die Strumpfspitze zeigt nach vorne.



Stülpen Sie den Strumpf so weit über den Rohrkörper, bis das Fersengestrick am oberen Rand des Rohrkörpers erscheint.

## Anziehvorgang mit/ohne Haltestangen: *einfach rein!*



Setzen Sie den Socks-jet vor sich auf den Boden. Zur besseren Standsicherheit stützen Sie sich an einem standfesten Objekt ab oder führen Sie den Vorgang sitzend durch.



Gleiten Sie mit der Fußspitze in den geöffneten Strumpf. Wenn Sie mit der Ferse den Boden der Ausgleitzzone erreicht haben, ist die Ferse im Strumpf positioniert.



Ziehen Sie nun den Fuß mit dem Strumpf nach oben, um aus dem Rohrkörper zu gelangen. Mit dem anderen Fuß können Sie im Bedarfsfall den Socks-jet fixieren.



Da jetzt die Ferse positioniert ist, streifen Sie den Strumpf mit den Händen weiter hoch bis unter das Knie oder bei Schenkelstrümpfen weiter bis zum Oberschenkel.

## Ausziehvorgang mit Haltestangen: *einfach raus!*



Führen Sie den Ausziehvorgang im Sitzen durch. Stellen Sie den Fuß mit angezogenem Strumpf in den Socks-jet.



Stülpen Sie den Strumpf von oben über den Rohrkörper. Ziehen Sie ihn an den Haltebacken vorbei, möglichst weit nach unten.



Drücken Sie mit den Handgriffen die Haltebacken gegen den Rohrkörper.



Ziehen Sie Ihren Fuß langsam aus dem fixierten Strumpf heraus.

**Pflegeanleitung:** Der Socks-jet kann mit haushaltsüblichen, milden Reinigern feucht abgewischt werden. Zur Desinfektion empfehlen sich Hygiene-Sprays mit desinfizierenden Substanzen. Für die Desinfektion im Sterilisator ist der Socks-jet **nicht** geeignet.

**Zur Beachtung:** Bei kritischen Hautzuständen ist auf den Gebrauch des Anziehers zu verzichten, z.B. offene Wunden, empfindliche Hautoberflächen. Beschädigte Geräte dürfen nicht benutzt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

**Tipp!** Tragen Sie zur Schonung ihrer Kompressionsstrümpfe Gummihandschuhe, das verhindert Laufmaschen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz und ein gleichmäßiges Maschenbild.



Einfache Anwendung durch Hilfspersonal auch bei Bettlägigkeit.

Vertrieb:

**Salzmann**  
**MEDICO**

SALZMANN AG  
Salzmann MEDICO  
Rorschacher Strasse 304  
CH-9016 St.Gallen  
Switzerland

Tel. (+41) 071 282 12 12

Fax (+41) 071 282 12 10

medico.sg@salzmann-group.ch  
www.salzmann-group.ch