

Gebrauchsanweisung Socks-jet

I. Vorbereitung



Schritt 1

Stellen Sie den Socks-jet auf eine ebene, trockene Fläche. Der Haltegriff zeigt zu Ihnen und die Rohröffnung nach vorne. Tragen Sie zur Schonung der Strümpfe Gummihandschuhe.



Schritt 2

Ziehen Sie den Strumpf über den Rohrkörper und achten darauf, dass die Strumpfspitze nach vorne zeigt.



Schritt 3

Streifen Sie den Strumpf so weit über den Socks-jet, bis das Fersengestrick am oberen Rand des Rohrkörpers erscheint.

II. Anziehvorgang



Schritt 1

Stellen Sie den Socks-jet vor sich auf den Boden und stabilisieren Ihre Position oder setzen sich hin. Gleiten Sie mit der Fußspitze in den geöffneten Strumpf.



Schritt 2

Treten Sie mit dem Fuß durch, bis die Ferse im Strumpf positioniert ist. Ziehen Sie nun den Strumpf nach oben, um aus dem Rohrkörper zu gelangen. Kontrollieren Sie nochmals den Sitzkomfort von Fußspitze und Ferse.



Schritt 3

Streifen Sie den Strumpf mit den Händen weiter hoch in Richtung Knie bzw. Oberschenkel. Achten Sie auf einen faltenfreien Sitz und ein gleichmäßiges Maschenbild.

IV. Passive Anwendung



Mit Hilfestellung

Nutzen Sie den integrierten Handgriff für eine einfache Anwendung durch Hilfs- und Pflegepersonal.